

PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- Después de que la batería esté llena, el cargador debe ser retirado.
- No utilice el producto en condiciones de carga.
- Lea atentamente el manual de operaciones antes de utilizar el producto.

PROPOSITOS Y BENEFICIOS

- Adecuado para el masaje físico y el cuidado de la piel antes o después de hacer ejercicio
- Acelera el calentamiento y la recuperación proporciona impulsos específicos de presión en el tejido muscular del cuerpo.
- Reduce el dolor muscular y la rigidez potente motor de alto par con tecnología Glide™ silenciosa. Se puede utilizar para activar, calmar o aflojar los músculos/fascia en todo el cuerpo.
- Mejora el rango de movimiento y la flexibilidad la estimulación expansiva proporciona un alivio integral al alcanzar las fibras musculares superficiales y profundas.



No toque esta parte para evitar la inmersión de los dedos cuando el dispositivo se pone en marcha sin una cabeza de masaje.



Diagrama no toque esta parte para evitar el vaciado del dedo cuando el dispositivo se instala con un cabezal de masaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Solo para uso de adultos.
2. Úselo solo en una superficie seca y limpia del cuerpo, sobre la ropa presionando ligeramente y moviéndose por todo el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
3. Utilice el dispositivo de masaje solo en el tejido blando del cuerpo como desee sin causar dolor o incomodidad. No lo use en la cabeza ni en ninguna zona dura u ósea del cuerpo.
4. Utilice solo los aplicadores que proporcionen el mejor efecto deseado.
5. Los moretones pueden ocurrir independientemente de la configuración del control o de la presión aplicada. Revise las áreas tratadas con frecuencia y deténgase inmediatamente a la primera señal de dolor o incomodidad.
6. Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo lejos del eje y la parte posterior del aplicador, ya que puede producirse un pellizco.
7. No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación de la pistola de masaje.
8. No se sumerja el masajeador en agua, ni permita que el agua entre en los orificios de ventilación del dispositivo de masaje.
9. No deje caer el dispositivo de masaje.

10. Se recomienda solo usar el cargador del dispositivo de masaje de 25,2v DC suministrado.

11. Examine cuidadosamente el dispositivo y la batería antes de cada uso.

12. No altere el dispositivo de masaje de ninguna manera.

13. Nunca deje el dispositivo de masaje funcionando o cargando sin supervisión.

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. No sumerjas en agua. Manténgase alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libres de polvo y escombros.
2. No retire los tornillos ni intente desmontarlos.
3. No opere continuamente durante más de una hora. Deje que el dispositivo descansa durante 30 minutos antes de reutilizarlo.
4. Solo para uso de adultos. No usar si está lesionado. Consulte a su médico antes de usar este producto.

PRECAUCIONES DE USO

POR FAVOR, NO UTILICE LA PISTOLA DE MASAJE NI NINGÚN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN OBTENER PRIMERO LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO SI SE APLICA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, reemplazos articulares recientes o DIU (dispositivo intrauterino), clavos o placas de metal o cualquier preocupación sobre su salud física.

Frágil

Las personas y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen cualquier dispositivo de vibración. Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero a un médico.

La experiencia práctica ha demostrado que la integración del ejercicio vibratorio en un plan de tratamiento es aconsejable en varios casos. Esto debe hacerse bajo el consejo y acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

GARANTÍA

SI EN EL PLAZO DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O MANO DE OBRA, REPARARÁ, REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO, O LOS COMPONENTES NECESARIOS, DE FORMA GRATUITA.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (A): daños causados por accidente, abuso, mal manejo o transporte.
(b): unidades sometidas a reparación no autorizada.
(c): unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones.
(d): daño que exceda el costo del producto.
(e): deterioro del producto entregado como resultado de condiciones anormales de almacenamiento y / o protección en las instalaciones del cliente.
(F): no proporcionar la prueba de compra con fecha.

PISTOLA DE MASAJES FRIO/CALOR WS-059 MANUAL DE USO



ICM THERAPY



¡ Gracias por adquirir nuestros productos !

INSTRUCCIONES DE USO

Leer antes de usar

INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE MASAJE

- Desmontaje y montaje de la cabeza de masaje se lleva a cabo en forma de enchufe, que está libre de atornillar;
- Fijar la barra vertical roja de la cabeza fría y caliente en la muesca del pistón;
- Asegúrese de que se inserta en la parte inferior.



MODO DE CARGA

- El puerto de carga se encuentra en el extremo superior de la parte inferior del mango del producto.
- Cargue completamente la batería durante cinco horas antes de su primer uso.
 - En cuanto a la batería recargable, está disponible un dispositivo especial de conexión por cable USB de tipo -c y se debe utilizar un adaptador de carga de 5 voltios (se recomienda 5V y 2A).

FUNCIONAMIENTO

- Comience, la temperatura inicial será de unos 16 ° C y el indicador se vuelve azul.
- Cuando el botón se pulsa de nuevo por segunda vez, entonces la temperatura girará alrededor de 18 ° C y el indicador se convertirá en púrpura.
- Presione el botón de nuevo durante el tercer tiempo, entonces la temperatura aumentará a 20 ° C y el indicador se pondrá rojo. De acuerdo con este ciclo de operación, habrá una necesidad de presionar la tecla de modo de terapia en frío durante dos segundos para apagarlo.
- Cuando el dispositivo está encendido, si cualquier botón de función es presionado brevemente, la función correspondiente se iniciará.
- Cuando las funciones están completamente apagadas el indicador mostrará consistentemente la energía de la batería durante cinco segundos y el dispositivo está en estado de espera. El dispositivo se puede iniciar pulsando brevemente cualquier tecla de función. El dispositivo se apagará automáticamente sin operación durante cinco segundos.
- Para la función de la terapia caliente o la función de la terapia fría mencionada anteriormente, el cabezal de masaje frío y caliente debe ser instalado antes de su uso porque otros cabezales de masaje no tienen tales funciones.
- Las funciones de la vibración, la terapia caliente y la terapia fría se pueden operar de forma independiente.
- Para la terapia con vibraciones en frío y en caliente, el tiempo de funcionamiento automático es de 15 minutos para cada función.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO


- Use una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquela con un paño suave.
- Cargue el dispositivo al menos 1 vez al mes sin no es usado por mucho tiempo.

CABEZALES



Nota: la línea sólida amarilla en la figura es la línea de alineación de productos, y es de color negro brillante en los productos reales.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

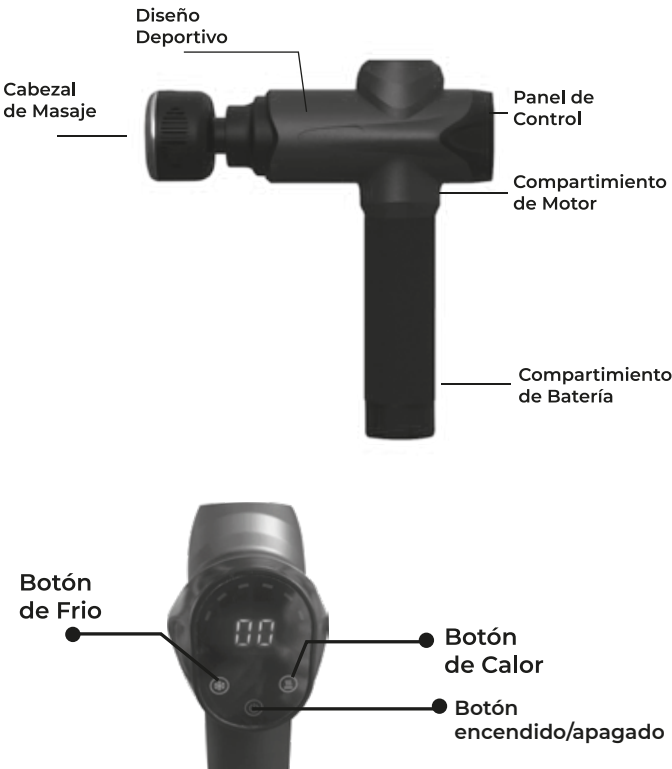

Nombre del producto Pistola de Masaje Frio/Calor	Modelo de producto WS-059
Peso neto de producto:620g	Voltaje de entrada: 110 - 220V
Potencia_ 25W (Máx 35W)	Especificación de la Batería 11.1V - 2400mA
Nivel de Fuerza 3 Niveles disponibles para su ajuste	Tiempo de carga 5 horas Aprox. Adaptador 12.6 V 0.5A
Tamaño del Masajeador	156x59x151 mm
Duración de la batería 2-3 horas vibración constante 2-3 horas en frío 2-3 horas en caliente	Tiempo Establecido En vibración constante: 15 min En frío: 15 min En caliente: 15 min
Valor temperatura en Caliente	● Nivel 1: 38 °C ● Nivel 2: 40 °C ● Nivel 3: 42 °C
Valor temperatura en Frio	● Nivel 1: 20 °C ● Nivel 2: 18 °C ● Nivel 3: 16 °C
Habrá una desviación más o menos de 5 °C en los valores anteriores, dependiendo del entorno y las condiciones del servicio.	
Velocidad Nominal del Motor	1200 - 2300 Rpm

La cabeza del masajeador se desliza y se cae	Compruebe si el cabezal de masaje está instalado en su lugar
El producto no se podía encender	Compruebe si la batería es suficiente para encenderse (por favor cargue durante más de 5 horas si no está en uso durante mucho tiempo)
El producto no se puede cargar	Compruebe si el puerto de carga está conectado correctamente.
Se detiene repentinamente después de una carrera continua de 10 minutos	Este fenómeno es el ajuste de protección de largo plazo que cambie el modo de ejecución al modo de espera. (el reinicio está disponible pulsando el botón y es completamente normal)
El golpe agudo o una función de golpe se detiene después de que el cabezal del masajeador se bloquea	Este fenómeno es el ajuste de función de protección anormal, cambiando del modo del funcionamiento, al modo de espera(el reinicio está disponible pulsando la tecla y es completamente normal).