


7. Cabezal Calentador

Capacidad de la batería	900Ah
Tipo de batería	18350
Tiempo de carga	3 – 5 horas
Cargador aplicable	5v – 2A cargador de teléfono móvil
Corriente de salida	0.21 – 0.23A
Tiempo de protección de encendido	15 Minutos
Temperatura máxima	1: 44 °C máx. 2: 56 °C máx. 3: 61 °C máx.

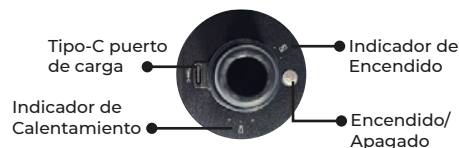

Presione el botón de encendido una vez, el indicador de calefacción se iluminará; presione el Botón de encendido por segunda y tercera vez, se encenderán otros dos indicadores de calefacción. Ilumina uno por uno; La energía se apagará si presiona el botón de encendido nuevamente cuando todos los indicadores de calefacción están encendidos.

La luz azul del indicador de alimentación sugiere que la batería está en condiciones normales;

La luz roja parpadeante del indicador de alimentación sugiere que la batería está baja y es necesario ser cargado.

La luz indicadora de encendido es roja durante la carga y se volverá azul cuando esté completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Solo para uso de adultos.
2. Úselo solo en una superficie seca y limpia del cuerpo, sobre la ropa presionando ligeramente y moviéndose por todo el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
3. Utilice el dispositivo de masaje solo en el tejido blando del cuerpo como desee sin causar dolor o incomodidad. No lo use en la cabeza ni en ninguna zona dura u ósea del cuerpo.
4. Utilice solo los aplicadores que proporcionen el mejor efecto deseado.
5. Los moretones pueden ocurrir independientemente de la configuración del control o de la presión aplicada. Revise las áreas tratadas con frecuencia y deténgase inmediatamente a la primera señal de dolor o incomodidad.
6. Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo lejos del eje y la parte posterior del aplicador, ya que puede producirse un pellizco.
7. No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación de la pistola de masaje.
8. No se sumerja el masajeador en agua, ni permita que el agua entre en los orificios de ventilación del dispositivo de masaje.
9. No deje caer el dispositivo de masaje.

10. Se recomienda solo usar el cargador del dispositivo de masaje de 25,2v DC suministrado.

11. Examine cuidadosamente el dispositivo y la batería antes de cada uso.

12. No altere el dispositivo de masaje de ninguna manera.

13. Nunca deje el dispositivo de masaje funcionando o cargando sin supervisión.

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. No sumerjas en agua. Manténgase alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libres de polvo y escombros.
2. No retire los tornillos ni intente desmontarlos.
3. No opere continuamente durante más de una hora. Deje que el dispositivo descanse durante 30 minutos antes de reutilizarlo.
4. Solo para uso de adultos. No usar si está lesionado. Consulte a su médico antes de usar este producto.

PRECAUCIONES DE USO

POR FAVOR, NO UTILICE LA PISTOLA DE MASAJE NI NINGÚN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN OBTENER PRIMERO LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO SI SE APLICA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, reemplazos articulares recientes o DIU (dispositivo intrauterino), clavos o placas de metal o cualquier preocupación sobre su salud física.

Frágil

Las personas y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen cualquier dispositivo de vibración. Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero le recomendamos que consulte primero a un médico.

La experiencia práctica ha demostrado que la integración del ejercicio vibratorio en un plan de tratamiento es aconsejable en varios casos. Esto debe hacerse bajo el consejo y acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

GARANTÍA

SI EN EL PLAZO DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTE PRODUCTO FALLA DEBIDO A UN DEFECTO EN EL MATERIAL O MANO DE OBRA, REPARARÁ, REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO, O LOS COMPONENTES NECESARIOS, DE FORMA GRATUITA.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE:

- (A): daños causados por accidente, abuso, mal manejo o transporte.
(b): unidades sometidas a reparación no autorizada.
(c): unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones.
(d): daño que exceda el costo del producto.
(e): deterioro del producto entregado como resultado de condiciones anormales de almacenamiento y / o protección en las instalaciones del cliente.
(F): no proporcionar la prueba de compra con fecha.

PISTOLA DE MASAJE CON CALOR WS-020 MANUAL DE USO



ICM THERAPY



¡ Gracias por adquirir nuestros productos !

INSTRUCCIONES DE USO

Leer antes de usar

MODO DE CARGA

1. Carga completa de la batería es de 3 a 5 horas antes del primer uso, ya sea conectada o separada del dispositivo.
2. La banda LED de las luces de la batería, se pulsa para mostrar el nivel de la batería e indicar la carga activa.
3. Con la batería conectada, las luces LED de la unidad parpadean para mostrar el nivel de la batería e indicar la carga activa.
4. La carga completa se indica cuando todas las luces LED se detienen, dejan parpadear y permanecen completamente iluminadas.
5. La batería se puede recargar en cualquier momento y en cualquier nivel de batería.
6. No se recomienda agotar completamente la batería a la luz LED roja.
7. El tiempo promedio de duración es de más de 6 horas, dependiendo del nivel de velocidad y la presión aplicada durante el uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Alinee y conecte la batería a la base de la unidad, asegúrese de que esté bien ajustada en su lugar.
2. Encienda el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte inferior de la batería a la posición ON. Apague el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte a la posición OFF.
3. Presione los botones + o - para ajustar la velocidad del masajeador.
4. Masajea la parte deseada del cuerpo a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Use una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquela con un paño suave.

La cabeza del masajeador se desliza y se cae	Compruebe si el cabezal de masaje está instalado en su lugar
El producto no se podía encender	Compruebe si la batería es suficiente para encenderse (por favor cargue durante más de 5 horas si no está en uso durante mucho tiempo)
El producto no se puede cargar	Compruebe si el puerto de carga está conectado correctamente.
Se detiene repentinamente después de una carrera continua de 10 minutos	Este fenómeno es el ajuste de protección de largo plazo que cambia el modo de ejecución al modo de espera. (el reinicio está disponible pulsando el botón y es completamente normal)
El golpe agudo o una función de golpe se detiene después de que el cabezal del masajeador se bloquea	Este fenómeno es el ajuste de función de protección anormal, cambiando del modo del funcionamiento, al modo de espera(el reinicio está disponible pulsando la tecla y es completamente normal).

ESPECIFICACIONES



La pistola de masaje de con calor, es un dispositivo de vibración recargable portátil de ajuste largo. Puede reducir eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después de un ejercicio intenso y aliviar la incomodidad de los músculos en la población sedentaria y prolongada.

Parámetros técnicos

Modelo	Descripción	Tensión Nominal	Frecuencia Nominal	Duración batería	Cargador	Batería	Amplitud
WS-020	Pistola de masaje con calor	16.8 V	20-58Hz	3H	16.8 V	6 Baterías	10MM

Especificaciones



1. Coloque el interruptor (ON) de encendido en la parte inferior de la máquina
 2. Presione el botón de inicio y la máquina comenzará a funcionar.
 3. Presione los botones + o - para ajustar la velocidad de la máquina. Presione el botón M y puede elegir los tres programas: P1/P2/P3.
 4. Cuando la potencia de la batería es inferior al 20 %, la línea de luz en la parte inferior de la máquina se muestra en rojo; cuando la potencia de la batería es inferior al 10 %, la ventana de visualización de energía muestra E1, lo que indica que necesita cargarse a tiempo.
 5. Cuando la batería está llena, la línea de luz en la parte inferior de la máquina cambia de rojo a verde.
- P1: 1-3 Nivel
P2: 7-10 Nivel
P3: 16-20 Nivel

Modo de ciclo de bajo nivel.
Modo de ciclo de nivel medio.
Modo de ciclo de alto nivel.

Modo de uso - Cabezales

1. Forma redonda



El diseño esférico redondo produce una potencia de salida de tipo de propagación y difusión entre la recepción y el empuje. La fuerza es uniforme y suave. Es adecuado para masajear y relajar la cintura, el abdomen, las nalgas y las piernas. Además de la relajación muscular antes y después del ejercicio, recomendando a los entusiastas del fitness de peso ligero como el baile, el yoga y los aeróbicos.

2. Forma de seta

Diseño pequeño y breve, sobre la base del plano, se añade un pequeño arco que se ajusta al mecanismo de modelado del cuerpo y lo hace sentir mejor. Adecuado para los músculos internos y externos del abdomen, el pecho y las piernas del cuerpo humano.



3. Forma de U



El camino de la fuerza entre los dos puntos es uniforme, la estimulación está en su lugar y es potente, lo que puede llevar a cabo un simple masaje de acupuntura.

El tamaño razonable del ancho en forma de U evita perfectamente la columna vertebral humana y la vértebra cervical, y logra una mejor sensación de experiencia. Adecuado para el hombro, la columna cervical y los músculos bilaterales. (No puede golpear directamente la columna cervical y la columna vertebral, causará lesiones físicas)

4. Forma cónica

Forma simple, llena de experiencia e impacto, presión directa a las profundidades. Adecuado para meridianos, plantas de los pies, palmas de las manos, tendones de Aquiles, músculos romboides de la espalda, etc.



5. Cabeza de pala



Es muy adecuado para masajes de acupresión. Se utiliza para la relajación de varios músculos. Como la palma de tu mano y tu suela.

6. Cabezal Flecha

Se utiliza únicamente para masajear pies y manos y alivia el dolor en los tejidos.

