

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALMOHADILLA TÉRMICA HÚMEDO/SECO

Referencia: SW-H10B **Tamaño:** 30 × 60 cm **Garantía:** 1 año*

Uso: Personal (no profesional).

Lea todo el manual cuidadosamente antes de usar este dispositivo.

1. Uso previsto

Dispositivo diseñado para proporcionar **alivio temporal** mediante calor superficial.

- Dolor de espalda crónico
- Dolor postoperatorio
- Dolores menstruales
- Artritis
- Dolor muscular
- Lesiones deportivas

2. Componentes

- Almohadilla térmica eléctrica
- Control con botón (selección de temperatura)
- Funda protectora lavable
- Esponja humedecible (para calor húmedo)

3. Especificaciones técnicas

Tipo	Húmedo/Seco con esponja
Material	PVC + funda de vellón + esponja
Voltaje	120 V~ 60 Hz
Niveles	Warm / Low / Medium / High + Off
Apagado automático	90 minutos

4. Datos regulatorios y trazabilidad

Registro Sanitario: INVIMA 2026DM-0032007

Complete y conserve: **Lote y Código interno** (si aplica) para trazabilidad.

5. Seguridad: advertencias y precauciones

PELIGRO: Superficies calientes. Para reducir riesgo de quemaduras, descargas eléctricas e incendios, use este producto únicamente según las indicaciones.

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2. No use el producto mientras duerme.
- 3. No deje el aparato desatendido y manténgalo fuera del alcance de niños.
- 4. No usar en bebés.
- 5. No utilizar en animales.
- 6. No usar en personas dormidas o inconscientes.
- 7. Si hay mala circulación o pérdida de sensibilidad, úsese solo bajo supervisión.
- 8. Personas con diabetes o problemas circulatorios deben consultar a su médico antes de usar.
- 9. No usar en piel sensible, irritada o lesionada.
- 10. Las quemaduras pueden ocurrir independientemente del nivel; revise la piel con frecuencia.
- 11. No usar en ambientes ricos en oxígeno.
- 12. No fijar con alfileres, ganchos u objetos metálicos.
- 13. No se sienta sobre la almohadilla ni la coloque debajo del cuerpo.
- 14. No doble la almohadilla ni realice pliegues bruscos; evite objetos puntiagudos.

Uso responsable: Si el dolor persiste o se trata de una lesión grave, consulte a un profesional de salud.

6. Seguridad eléctrica y uso del cable

- No aplicar cremas, ungüentos o productos que generen calor bajo la almohadilla.
- No tire del producto por el cable de alimentación.
- No desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Si usa extensión, debe tener capacidad eléctrica igual o mayor a la del producto.
- No use el cable como mango.
- No use el producto si el cable/enchufe está dañado, si ha caído o no funciona correctamente.
- No almacene el cable apretado; puede dañar componentes internos.
- Producto diseñado solo para uso personal; no usar al aire libre ni con otros fines.

Enchufe polarizado: puede incluir una clavija más ancha. Encaja de una sola forma. Si no encaja, invierta el enchufe; si aún no encaja, consulte a un electricista calificado. No modifique esta función de seguridad.

7. Cuidado, limpieza y almacenamiento

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Retire la funda antes de lavar (la funda es lavable).
- Lavar con detergente suave en agua fría o tibia (ciclo suave).
- Seque al aire: cuelgue o coloque plana para secar.
- Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes del próximo uso.
- Para almacenar, enrolle sin apretar y guarde en lugar fresco y seco. Evite doblado brusco.

8. Instrucciones de uso

Antes de usar: inserte siempre la almohadilla dentro de la funda proporcionada.

8.1 Uso en seco

- Conecte la almohadilla a la toma eléctrica (120 V~).
- Presione el botón para seleccionar nivel: Warm (tibio), Low (bajo), Medium (medio), High (alto) u Off (apagado).
- Coloque sobre la zona a tratar. No se siente, no la coloque debajo del cuerpo y no la use al dormir.
- El dispositivo regresa a **OFF** automáticamente después de **90 minutos**.

8.2 Uso en húmedo

Humedecer la esponja incluida para aumentar la penetración del calor. **No sumerja** la unidad eléctrica en agua.

- Humedezca la esponja (no empapar; eliminar exceso de agua).
- Inserte la esponja en la funda junto con la almohadilla.
- Use la almohadilla como en modo seco y monitoree la piel regularmente.

9. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Cuándo usarla?	Cuando se requiera alivio temporal mediante calor para comodidad personal.
¿Temperatura máxima?	No excede 80 °C (176 °F) en el ajuste más alto.
¿Cuánto tarda en calentar?	Referencial: Baja 6 min, Medio 8 min, Alta 10 min (puede variar).

10. Garantía (1 año por defectos de fábrica)

Alcance: Este producto cuenta con una garantía de **1 (un) año** a partir de la fecha de compra, que cubre **defectos de fabricación** en materiales y mano de obra.

No cubre: daños por mal uso, golpes, caídas, humedad/inmersión de la unidad eléctrica, manipulación o reparaciones no autorizadas, desgaste normal, uso contrario a este manual o variaciones del suministro eléctrico fuera de especificación.

Para hacer efectiva la garantía: conserve y presente la factura o comprobante de compra. Tenga disponible la referencia **SW-H10B** y el **lote** (si aplica).

*La garantía no afecta los derechos del consumidor establecidos por la normativa aplicable.

11. Importador / Fabricante

Importado y distribuido por: Import Corporal Medical S.A.S. Avenida Bolívar 8N-67 Ofc 406-409.

Fabricante: Xi an Bellavie and Sunbright Group Co., LTD. 11102, Floor 11, Suite 1, Building 12, Taihua Jinmao International Plaza, No. 16 South of Fenghui Rd, Hi-Tech Zone 710075, Xi'An, Shaanxi, China.

*Garantía válida por defectos de fábrica. Consulte condiciones en la sección 10.