

PISTOLA DE MASAJE

MANUAL DE USUARIO ①



Instrucciones de operación

1. Mantén presionado el botón de encendido para encender y la pantalla mostrará el nivel de batería.
Con una presión corta, activa la función de temporizador de 10 minutos. Cuando haya casi 0 % de energía, la luz roja parpadeará.
2. Presiona brevemente el botón de encendido para cambiar de engranaje.
3. Elige un dispositivo de carga antes de cargar.
4. Conéctalo al adaptador de 5V para la primera carga.
5. Modo táctil: la luz digital muestra el nivel de potencia durante la carga y muestra el nivel de engranaje cuando está en uso.

Especificaciones



La pistola de masaje de fascia muscular profunda es un dispositivo de vibración portátil recargable con ajuste de gran amplitud y largo alcance. Puede reducir eficazmente el dolor causado por la acumulación de ácido láctico después del ejercicio intenso y aliviar la incomodidad muscular.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



¡Gracias por comprar nuestros productos!



• **Cabezal redondo**

Relaja grandes grupos musculares, como piernas y cintura.



• **Cabezal cónico**

Alivia el tejido profundo como puntos gatillo, rodillas y articulaciones.



• **Cabezal plano**

Relaja y alivia todos los músculos del cuerpo.



• **Cabezal en forma de U**

Alivia la rigidez de la columna cervical y la columna vertebral.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantener los orificios de ventilación libres de polvo y residuos.
2. No retirar tornillos ni intentar desarmarlo.
3. No usar de forma continua por más de una hora. Permitir descansar por 30 minutos antes de volver a usar.
4. Desconectar el cargador del dispositivo después de cargar o antes de usar.
5. Solo para uso de adultos. No usar si está lesionado. Consultar con su médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

1. Solo para uso de adultos.
2. Usar únicamente sobre una superficie seca y limpia del cuerpo, a través de la ropa ligera, presionando suavemente y moviendo sobre el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
3. Usar la parte más suave del cuerpo solo sobre las partes blandas deseadas sin causar dolor ni incomodidad. No usar en la cabeza ni en ninguna parte del cuerpo.
4. Usar únicamente los aplicadores que proporcionen el mejor efecto deseado.
5. El cepillado puede realizarse sin importar el ajuste de control o la presión aplicada. Detener inmediatamente si siente dolor o incomodidad. Revisar la primera señal de dolor o incomodidad.
6. Mantener los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo alejada del eje del aplicador giratorio, ya que podría atraparse y causar moretones.
7. No colocar ningún objeto en los orificios de ventilación de la pistola de masaje.
8. No sumergir en agua ni permitir que el agua entre en los orificios de ventilación de la pistola de masaje.
9. No usar en ningún otro lugar que no sea el destinado.
10. No manipular ni alterar la Pistola de Masaje de ninguna manera.
11. Nunca dejar la Pistola de Masaje sin supervisión al operarla o cargarla.
12. Solo se puede usar el adaptador original tipo C.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

POR FAVOR, NO USE LA PISTOLA DE MASAJE NI NINGÚN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN SIN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU MÉDICO, SI TIENE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o retinopatía diabética, desgaste o rotura de marcapasos, reemplazos articulares recientes o dispositivos intrauterinos, hernias de disco, espondilolistesis, espondilólisis o espondilolisis reciente, reemplazos articulares recientes o dispositivos intrauterinos, fracturas de espinas vertebrales o LUD, insuficiencia cardíaca, pasadores o placas metálicas, cualquier implante individual y los niños deben estar acompañados por un adulto al usar cualquier dispositivo de vibración. Estas contraindicaciones no significan que no pueda usar un masaje de vibración o ejercicio. Le recomendamos consultar a su médico primero.

La investigación en curso se está realizando para conocer los efectos de los ejercicios de vibración para condiciones médicas específicas. Esto permitirá acortar la lista de contraindicaciones indicadas arriba. La experiencia práctica ha demostrado la integración de la terapia de ejercicio con vibración en la fisioterapia en un número de casos. Esto debe hacerse bajo el consejo de un médico y con el acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- (a): daños causados por accidente, abuso, mal manejo o transporte;
- (b): unidades sujetas a reparación no autorizada;
- (c): unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones;
- (d): daños que exceden el costo del producto;
- (e): deterioro de las piezas del entregadas por el producto que resulta de un almacenamiento anormal y/o condiciones de resguardo del cliente como humedad extrema.
- (f): no presentar la fecha comprobante de compra.

Algunos estados y países no permiten una limitación de daños, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía de servicio está disponible a través de las políticas operativas y los distribuidores internacionales.