

ELECTRODOS CARBONADOS

CUADRADOS - 4.5 CM X 5 CM - COLOR NEGRO

MANUAL DE USO




CALIDAD, DURABILIDAD Y SEGURIDAD
PARA TU TRATAMIENTO

1

DESCRIPCIÓN

Estos electrodos conductores proporcionan más corriente para distribuirlos mejor en toda la almohadilla. Son autoadhesivos y fáciles de usar, y con un paño bronceado de primera calidad y un conector de cable de cobertura completa, son duraderos y seguros para cualquier usuario.



CARACTERÍSTICAS

Están diseñados para su uso con estimulación eléctrica.

- Antes de la aplicación del electrodo limpie con agua y jabón, y posteriormente seque el área.
- Fije los conductores de los cables a los electrodos.
- Retire con cuidado los electrodos de la lámina de almacenamiento, y conserve la bolsa para guardarlos.

Nota: no pegar los electrodos juntos, sino sobre una superficie plástica.

- 1 Coloque los electrodos en la piel, aplicando la parte del centro y deslizando hacia afuera.
- 2 Conecte los electrodos a los cables, verificando que el dispositivo se encuentre apagado.
- 3 Encienda el dispositivo y ajuste gradualmente la intensidad de la corriente.
- 4 Cuando complete el tratamiento, apague el equipo y retire con cuidado sin halar el cable de los electrodos.

PRESENTACIÓN



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Electrodos Carbonados Cuadrados
Reutilizables
Goma negra (4.5 cm x 5 cm)
Conector de 2mm, cable de cobertura, durabilidad y dispersión total de la corriente
4 unidades por paquete sellado

2

PRECAUCIONES



Lea completamente este manual antes de utilizar el producto.



Uso exclusivo con dispositivos de estimulación eléctrica.



No aplicar sobre piel irritada, lesionada o con heridas.



Mantener los electrodos limpios y secos para asegurar una correcta adhesión.



Desconectar los cables del dispositivo antes de retirar los electrodos.



Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

¿PARA QUÉ SIRVE?



Los electrodos carbonados están diseñados para transmitir impulsos eléctricos desde el dispositivo de estimulación a través de la piel, permitiendo tratamientos de estimulación que ayudan a aliviar el dolor muscular, relajar los músculos, mejorar la circulación y apoyar los procesos de rehabilitación física.

3