



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindio
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
	Pais de Origen:	ESTADOS UNIDOS
	Nombre:	ELECTROESTIMULADOR (TENS) - ROSCOE
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
	Referencias:	EMS 7500
INDICACIONES DE USO: 1. La relajación de los espasmos musculares 2. La prevención o retraso de la atrofia por desuso 3. El aumento de la circulación sanguínea local 4. Reeducción muscular 5. Estimulación post-quirúrgica inmediata de los músculos de la pantorrilla para prevenir trombosis venosa 6. Mantener o aumentar el rango de movimiento. Las unidades de EMS envían impulsos confortables a través de la piel que estimulan los nervios en el área de tratamiento. Cuando el músculo recibe esta señal se contrae como si el cerebro se ha enviado la señal. A sí mismo a medida que la intensidad de la señal aumenta, el músculo flexiona como en el ejercicio físico. Luego, cuando cesa el pulso, el músculo se relaja y el ciclo a iniciarse una vez, (estimulación, de contracción y relajación.) estimuladores musculares. Desarrollado sólo deben utilizarse bajo supervisión médica para la terapia adyuvante para el tratamiento de enfermedades y condiciones médicas.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Canal	Dual, el aislamiento entre canales	Condiciones de Almacenamiento	El EMS 7500 dispositivo empaquetado debe ser almacenado y transportado bajo el rango de: - Temperatura de -20 ° C - + 60 ° C, - Humedad relativa del 20% - 95% - Presión atmosférica 500hPa-1060 hPa.
Fuente de Alimentación	Una batería de 9 voltios, tipo 6F22		
Amplitud de Pulso	Ajustable 0-80 mA a 500 ohm de carga cada canal		
Pulso	Ajustable, 2-150 Hz, 1 Hz / paso		
Ancho de Pulso	Ajustable, 50-300us, 10us / paso	Temporizador	Ajustable, 1-60 minutos o continua. Ajustable en 1 minuto cada paso de 1 a 15 minutos, y 5 minutos cada paso de 15 a 60 minutos. Contar el tiempo de tratamiento automáticamente.
Voltaje de Salida	0-40V ajustable, salida máxima 40V pico a pico en 5000hm cargar cada canal		
Tamaño	10.1cm (L) x 6.1cm (W) x 2,45cm (H)	Peso	150 gramos (batería incluida)

Observaciones: