



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	YONGKANG WEISHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD
	País de Origen:	CHINA
	Nombre:	PISTOLA DE MASAJES FRIO/CALOR
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0028770
	Referencias:	ICM 059
INDICACIONES DE USO: Aplicar la pistola sobre la zona deseada, manteniendo un movimiento lento y constante. No mantener el dispositivo en un mismo punto por más de 1-2 minutos. Duración recomendada de la sesión: 5-15 minutos por zona. Ajustar la intensidad y temperatura según la comodidad del usuario. Evitar aplicar fuerza excesiva o presionar contra huesos.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Neto	620 g	Cabezales	
Potencia:	25W (Máx 35W)		
Tamaño de Masajeador	156x59x151 mm		
Duración de la Batería	2-3 hrs vibración Constante 2-3 hrs hrs en frío 2-3 hrs hrs en caliente		
Tiempo Establecido	En vibración constante: 15 min En frío: 15 min En caliente: 15 min		
Valor de temperatura en caliente	Nivel 1: 38°C Nivel 2: 40°C Nivel 3: 42°C		
Valor Temperatura Fría	Nivel 1: 20°C Nivel 2: 18°C Nivel 3: 16°C		

Habrà una desviación más o menos de 5 °C en los valores anteriores, dependiendo del entorno y las condiciones de servicio

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DURANTE EL USO		<i>Use una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquela con un paño suave.</i>	
* Después de que la batería esté llena, el cargador debe ser retirado. * No utilice el producto en condiciones de carga * Lea atentamente el manual de operaciones antes de utilizar el producto		<i>Cargue el dispositivo al menos 1 vez al mes si no es usado por mucho tiempo</i>	
		La cabeza del masajeador se desliza y se cae	Compruebe si el cabezal de masaje está instalado en su lugar
		Compruebe si la batería es suficiente para encenderse (por favor cargue durante más de 5 horas si no está en uso durante mucho tiempo)	
INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO		El producto no se podía encender	Compruebe si el puerto de carga está conectado correctamente.
		El producto no se puede cargar	Este fenómeno es el ajuste de función de protección anormal, cambiando del modo del funcionamiento, al modo de espera (el reinicio está disponible pulsando la tecla y es completamente normal).
		El golpe agudo o una función de golpe se detiene después de que el cabezal del masajeador se bloquea	Este fenómeno es el ajuste de protección de largo plazo que cambie el modo de ejecución al modo de espera. (el reinicio está disponible pulsando el botón y es completamente normal)
		Se detiene repentinamente después de una carrera continua de 10 minutos	