



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	COMPASS HEALTH BRANDS (CORPORATE OFFICE) ROSCOE MEDICAL, INC.
	Pais de Origen:	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
	Nombre:	QUATTRO 2.5
	Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029885
	Referencias:	DQ8450
	Indicación de uso: - PARA TENS, interferencial y premodulada: 1) Alivio sintomático del dolor crónico intratable 2) Dolor agudo postraumático 3) Dolor Agudo - Adicionalmente para EMS y Russian: 1) Relajación de espasmos musculares 2) Prevención o retraso de atrofia por desuso 3) Aumento de la circulación sanguínea local 4) Reeducción muscular 5) Mantenimiento o aumento de la amplitud de movimiento 6) Estimulación posquirúrgica inmediata de los músculos de la pantorrilla para evitar la trombosis venosa.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Suministro de Voltaje del adaptador:	100 V a 240 V, 50 Hz a 60 Hz, 0.6 A	Almacenamiento	Este dispositivo se ha probado e inspeccionado exhaustivamente para asegurar un rendimiento y funcionamiento adecuados. Para una pausa prolongada en el tratamiento, guarde el dispositivo con el adaptador en un lugar seco y protéjalo contra el calor, la luz solar y la humedad. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y ventilado. Nunca coloque ningún objeto pesado sobre el
Salida del Adaptador:	15 V 1.2 A máx.		
Tipo de Protección contra descargas eléctricas:	Equipo de Clase II		
Dimensiones:	(Al) 250 mm (L)*185 mm (L)*82 mm (Al)		
Dimensiones del Adaptador	88 mm (L)*48 mm (An)*29 mm	Entorno Almacenamiento:	Temperatura: -20 °C (-4 °F) a 55 °C (131 °F), Humedad relativa: 20% a 90%
Tiempo max de tratamiento	60 minutos	Entorno Operativo:	Temperatura: 10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F), Humedad relativa: 30% a 85%

Observaciones: