



GUÍA RÁPIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS O EQUIPOS BIOMÉDICOS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Empresa :	Import Corporal Medical SAS	Ciudad :	Armenia
N.I.T.:	900.733.777-4	Departamento :	Quindío
Telefono :	(6) 7312503	Dirección :	Av. Bolívar Calle 8N - 67, Of. 406 - 409
Correo :	clientes@importcorporalmedical.com		

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO O EQUIPO BIOMÉDICO

	Fabricantes:	ROSCOE MEDICAL, INC.
	País de Origen:	ESTADOS UNIDOS
	Nombre:	PORTABLE ULTRASOUND - ULTRASONIDO PORTÁTIL - ROSCOE
	Registro Sanitario:	INVIMA 2025DM-0013007-R1
	Referencias:	ULTRASONIDO PORTÁTIL US PRO™ 2000 segunda Edición Modelo Nº DU3035
	INDICACIONES DE USO: 1. Activar la función del dispositivo y la cabeza calentamiento 2. Aplique el gel de transmisión 3. Ajuste la intensidad de ultrasonido 4. Establezca el tiempo de tratamiento: 5. Coloque la cabeza del sonido en el área de tratamiento y comenzar tratamiento 6. Apague el dispositivo 7. Limpie el aparato después de cada uso	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE USO

Ultrasonido Frecuencia Modulada:	1.0MHz $\pm$ 10	Condiciones de Funcionamiento	5°C- 40°C, 30% - 75% de humedad relativa; 800 a 1060 hP
Max. Potencia de salida:	6.4W $\pm$ 20% (ciclo de trabajo de modulación al 100%)	Eficaz Irradiando Área:	4.0cm 2 $\pm$ 20%
Potencia de salida:	L: 0.32W $\pm$ 20% M: 3.20W $\pm$ 20% H: 6.40W $\pm$ 20	forma de onda:	Pulsada
Pulso Velocidad de repetición:	100 Hz $\pm$ 10%	max. intensidad efectiva:	1.6Wcm 2 $\pm$ 20% (ciclo de trabajo de modulación al 100%)
Ciclo de trabajo Modulación:	L (5%), M (50%), H (100%)	intensidad efectiva:	L:0.08w/CM 2 $\pm$ H:1.60Wcm 2 $\pm$ 20%

Observaciones: