

EJERCITADOR DE PEDAL

ICM THERAPY - MC50

Este **ejercitador de pedal** tiene un diseño compacto, plegable y cómodas correas que ayudan a mantener los pies y manos fijas, además aseguran la estabilidad. Asimismo, tiene una pantalla LCD multifunción que monitorea el ejercicio.



CARACTERÍSTICAS

La pantalla muestra la cantidad de vueltas, las revoluciones por minuto y las calorías quemadas. Además, estos pedales ofrecen ejercicios suaves, de bajo impacto, ideal para personas mayores o que estén en rehabilitación.

Correa de pedal ajustable



Control de resistencia



Pantalla LCD multifuncional




Botón plegable de liberación rápida



Portátil y fácil de guardar



Antideslizante y seguro

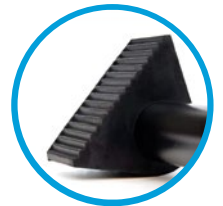

INCLUYE



1. Pedal ejercitador (1 pieza)
2. Manual de uso (1 pieza)
3. Perilla de intensidad (1 pieza)
4. Pantalla LCD (1 pieza)
5. Caja (1 pieza)

•Garantía: 30 días.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tipo de control: Perilla de intensidad.
 Tipo de pantalla: LCD multifuncional.
 Peso del paquete: 2,81 Kg
 Dimensiones: 51 x 36 x 35 cm
 Material: Acero Inoxidable

PRESENTACIÓN

- 1 Pedales ajustables.
- 2 Control de resistencia “perilla”.
- 3 Pantalla LCD multifuncional.
- 4 Botón plegable.
- 5 Antideslizante y seguro.



INSTRUCCIONES DE USO

1. EJERCITADOR DE PEDAL DESPLEGADO. Tire del tubo base (A) hacia afuera hasta que el botón de presión de la junta sobresalga completamente a través del orificio del soporte y se escuche un clic. Repita en el tubo base (B). Verifique que el pedal está completamente estable para dar inicio a la actividad.

