

PISTOLA DE MASAJE

FRIO/CALOR - WS059

La pistola de masaje frío calor ICMTHERAPY está equipada para ofrecer terapia de masaje de tejido profundo con facilidad. Se puede utilizar en casa o en lugares públicos, para aliviar la tensión muscular y el dolor. Esta pistola masajeadora viene con 7 cabezales de masaje intercambiables, cada uno diseñado para dirigirse a grupos musculares específicos y proporcionar una experiencia de masaje única.



CARACTERÍSTICAS

Con nuestra pistola de masajes frío/calor puedes personalizar tu experiencia de masaje para satisfacer tus necesidades específicas. Elija una velocidad más baja para un masaje suave o levántela para una terapia intensa.

- Adecuado para el masaje físico y el cuidado de la piel antes o después de hacer ejercicio.
- Acelera el calentamiento y la recuperación, proporcionando impulsos específicos de presión en el tejido muscular del cuerpo.
- Mejora el rango de flexibilidad y el movimiento, la inmersión expansiva proporciona un alivio integral al alcanzar las fibras musculares superficiales y profundas.

INCLUYE



- | | |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Masajeador frío/calor (1 pieza) |
| 2. | Cabezal frío/calor (1 pieza) |
| 3. | Cabezal redonda (1 pieza) |
| 4. | Cabezal cónica (1 pieza) |
| 5. | Cabezal de horquilla (1 pieza) |
| 6. | Cabezal pulgar (1 pieza) |
| 7. | Cabezal de U (1 pieza) |
| 8. | Cabezal plana (1 pieza) |
| 9. | Cargador (1 pieza) |
| 10. | Manual de uso (1 pieza) |

- 6 meses de garantía en el dispositivo, (partes y accesorios no aplican garantía).
- Registro invima

PRESENTACIÓN

- 1 Cabezal de masaje.
- 2 Diseño Deportivo.
- 3 Panel de control.
- 4 Compartimiento de motor.
- 5 Compartimiento de batería.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Pistola de masaje frio/calor.
Peso neto del producto	620 gr
Voltaje de entrada	110 - 220V
Nivel de fuerza	3 niveles disponibles para su ajuste
Tiempo de carga	5 horas aprox. Adaptador tipo plug 12.6v 0.5A
Tamaño del masajeador	156x59x151 mm
Duración batería	2-3 horas vibración constante. 2-3 horas en frio. 2-3 horas en caliente.
Tiempo establecido	En vibración Constante: 15 min. En frio: 15 min. En caliente: 15 min.
Valor temperatura caliente	Nivel 1: 38°C Nivel 2: 40°C Nivel 3: 42° C
Valor temperatura en frio	Nivel 1: 20°C Nivel 2: 18°C Nivel 3: 16° C
Velocidad nominal del motor	1200 - 2300 Rpm

Habrà una desviaci3n mas o menos de 5°C en los valores anteriores, dependiendo del entorno y las condiciones del servicio

PRECAUCIONES

- Se debe tener precauci3n en los pacientes en estado de embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugías recientes, ataques epilepticos - migrañas, hernias discales, espondilosis, reemplazos articulares recientes.
- Se debe tener en cuenta que el uso del masajeador en menores de edad, debe estar supervisado por un adulto responsable.


ADVERTENCIAS

- Utilice el dispositivo de masaje solo en el tejido blando del cuerpo como desee sin causar dolor o incomodidad.
- Los moretones puede recurrir independientemente de la configuraci3n del control o de la presi3n aplicada, detengase a la primera seña de dolor o incomodidad.
- No use el masajeador en zonas óseas del cuerpo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL DE MASAJE INSTALACIÓN

- Desmontaje y montaje de la cabeza de masaje se lleva a cabo en la forma de enchufe, que está libre de atornillar.
- Fijar la barra vertical roja de la cabeza fría/caliente en la muesca del pistón.
- Asegurese de que se inserta en la parte inferior.

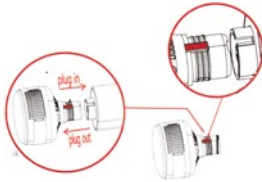

MODO DE CARGA

El puerto de carga se encuentra en el extremo superior de la parte inferior del mango del producto.

- Cargue completamente la batería durante cinco horas antes de su primer uso.
- En cuanto a la batería recargable, está tiene un Adaptador tipo plug 12.6v 0.5A.

PROBLEMA - SOLUCIÓN

Si la cabeza del masajeador se cae	comprobar si el cabezal de masaje está instalado en su lugar.
El producto no enciende	Compruebe si la batería es suficiente para encenderse (cargar aprox 5 horas).
El producto no se puede cargar	Comprobar si el puerto de carga está conectado correctamente.
Se detiene repentinamente después de una carrera continua de 10 minutos	Este fenómeno es el ajuste de protección de largo plazo que cambie el modo de ejecución al modo de espera
El golpe agudo o una función de golpe se detiene después de que el cabezal del masajeador se bloquea.	Este fenómeno es el ajuste de función de protección anormal, cambiando del modo funcionamiento, al modo espera.

CABEZALES

 <p>Cabezal Frio/caliente Se utiliza principalmente para masajear todas las áreas del cuerpo y relievand la fatiga muscular</p>	 <p>Cabezal redonda Se utiliza principalmente para masajes de tejidos profundos como las palmas de las manos, las plantas, las articulaciones, las venas.</p>
 <p>Cabezal Cónica Se utiliza principalmente para los grandes grupos musculares, como los brazos, la orilla inferior, el glutes, los muslos y las pantorrillas</p>	 <p>Cabezal de Horquilla adecuado para grandes grupos musculares como las nalgas y los muslos</p>
 <p>Cabezal Pulgar Se utiliza únicamente para masajear pies y manos</p>	 <p>Cabezal de U utiliza principalmente para los músculos salientes, tales como El cuello y la columna vertebral</p>
	 <p>Cabezal Plana Utilizada principalmente para masajes de cuerpo entero</p>