

GUANTES ROBOTS DE REHABILITACIÓN PARA MANO IZQUIERDA Y DERECHA

El **guante robot de rehabilitación** y la función de la mano combinan tecnología de robot flexible y neurociencia, y utilizan músculos biónicos neumáticos flexibles como fuente de energía para ayudar a los clientes a aprender de nuevo a través del ejercicio, mejorar la capacidad de actividad de la mano y acelerar el proceso desde tres niveles: **nervio, cerebro y músculo**.



CARACTERÍSTICAS

- 1 Botón encendido/apagado.
- 2 Botón subir intensidad.
- 3 Botón bajar intensidad.
- 4 Botón inicio/pausa.
- 5 Modos de uso.
- 6 Conexión de guantes.



INCLUYE



1. Guantes robots (1 pieza)
2. Panel de control (1 pieza)
3. Guante espejo (1 pieza)
4. Pelota de puya (1 pieza)
5. Cargador (1 pieza)
6. Manual de uso (1 pieza)

PRESENTACIÓN

- 1 Área de visualización del modo, incluyendo: modos automático, espejo y confrontación.
- 2. Visualización de estado, incluyendo: el host se está ejecutando, el host está en pausa
- 3 El host está conectado a la fuente de alimentación y el indicador de encendido muestra.
- 4 Clave de ajuste de la fuerza de la extensión y área de visualización.
- 5 Función de tiempo: registrar la duración de una sola sesión de entrenamiento Área de botones táctiles.
- 6 Botón de pausa/inicio para pausar o reanudar la ejecución
- 7 Tecla de cambio de modo, puede cambiar de modo de función
- 8 Tecla de encendido/apagado, utilizada para controlar el encendido y apagado del host.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Guante Robot
Tamaño máximo	L226mm X W146mm X H78mm
Peso	850g
Voltaje de carga nominal	8.4V
Corriente de carga nominal	2.5A

PRECAUCIONES

- Antes de entrenar, confirme que las manos a entrenar no están rígidas.
- Si las manos están rígidas, se debe llevar a cabo una manipulación manual, una compresa caliente, guantes de masaje flexibles, etc. antes del entrenamiento.
- No lo use solo para personas sin consentimiento del comportamiento o niños pequeños.

ADVERTENCIAS

- Si hay esguince de mano, trauma, lesión ósea desconocida, osteoporosis grave, fractura sin tratamiento, no utilice este producto sin la confirmación de un profesional.
- No utilice un cargador de corriente con un voltaje superior a 7,4 V2A. Por favor, mantenga el conector de alimentación seco.

PRESENTACIÓN

SEGURIDAD

1. Antes de entrenar, confirme que las manos a entrenar no están rígidas.
 - Si las manos están rígidas, se debe llevar a cabo una manipulación manual, una compresa caliente, guantes de masaje flexibles, etc. antes del entrenamiento.
2. No lo use solo para personas sin consentimiento del comportamiento o niños pequeños.
3. Si hay esguince de mano, trauma, lesión ósea desconocida, osteoporosis grave, fractura sin tratamiento, no utilice este producto sin la confirmación de un profesional.
4. No lavar los guantes directamente. Sumerja un paño suave en agua o detergente neutro, séquelo y limpie los guantes. Si es necesario, se puede limpiar o desinfectar con un trapo sumergido en una pequeña cantidad de alcohol medicinal, y luego usar después de un secado completo.

Tamaño de mano (Talla L)



Tamaño de mano (Talla XL)



Tamaño de mano (Talla M)

