

MINI MASAJEADORAS
DE CABEZA DORADO

Cuenta con cuatro modos de masaje ajustables, que simulan un masaje manual mediante suaves puntas de silicona, proporcionando una relajación profunda del cuero cabelludo y ayudando a aliviar la fatiga mental causada por el uso excesivo del cerebro.

Este producto contribuye a aliviar la tensión del cuero cabelludo, reducir las molestias, estimular el flujo sanguíneo hacia la cabeza y ayudar a recuperar la vitalidad física y mental.



CARACTERÍSTICAS

Además, incorpora una función de calor que favorece la circulación sanguínea, terapia de luz roja con efectos calmantes y relajantes, y tecnología de microcorriente EMS, que ayuda a mejorar la vitalidad del cuero cabelludo.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de carga	5V - 1A
Potencia nominal	5W
Capacidad batería	1100 mAh
Peso con caja	398gr
Color	Beige y dorado
Tamaño	6cm alto x 8cm ancho 9cm de largo

INCLUYE

1. Mini masajeador
2. 4 cabezales en silicona
3. Cable cargador
4. Caja
5. Manual de uso

PRESENTACIÓN



1. Botón de encendido/modo (Power/Mode):

Mantenga presionado el botón Encendido/Modo para encender o apagar el dispositivo.

Presione brevemente el botón Encendido/Modo para cambiar entre los cuatro modos de masaje en el siguiente orden:

Modo 1 → Modo 2 → Modo 3 → Modo 4

2. Botón de calor (Heating):

Presione brevemente el botón Calor para alternar entre los tres niveles de temperatura:

Bajo → Medio → Alto → Apagado

Cuando la función de calor está activada, la luz roja se enciende.

3. Botón EMS:

Presione brevemente el botón EMS para cambiar cíclicamente entre los niveles de intensidad de EMS, desde el nivel 0 hasta el nivel 6.

Indicación Modo			
Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
Luz verde	Luz azul	Luz naranja	Luz morada

Indicación de calor		
Bajo	Medio	Alto
Luz verde	Luz azul	Luz roja

Indicación de niveles EMS				
Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	
Luz verde	Luz azul	Luz naranja	Luz morada	

Indicación del estado de la batería			
Batería baja	Apagado automático por batería baja	Cargando	Carga completa
La luz roja parpadea lentamente.	La luz roja parpadea rápidamente 5 veces.	La luz roja parpadea con efecto de respiración.	Luz verde fija.