

BOTAS MASAJEADORAS INALÁMBRICAS

Las botas masajeadoras inalámbricas de compresión de aire están diseñadas para brindar un masaje secuencial que favorece la circulación sanguínea, alivia la sensación de piernas cansadas y contribuye a la recuperación muscular. Gracias a su sistema de compresión neumática, ejercen una presión controlada sobre pies, pantorrillas y piernas, proporcionando un masaje cómodo, uniforme y relajante.



CARACTERÍSTICAS

Protección y almacenamiento del producto

- Protección y almacenamiento del producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No coloque objetos sobre la unidad principal ni sobre la funda de tela.
- Este producto está diseñado únicamente para su uso en piernas y pies. No lo utilice en otras partes del cuerpo.
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado y un adaptador certificado para cargar el producto.
- Las partes de tela no son lavables. Para su limpieza, utilice un paño húmedo bien escurrido. Limpie la unidad principal con un paño suave.
- Cargue completamente el producto antes del primer uso o si la batería se ha descargado después de un período prolongado de almacenamiento.


INCLUYE



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. 2 botas masajeadoras
2. 2 paneles de control
3. 2 cables de carga tipo C
4. Caja
5. Manual de uso

PRESENTACIÓN

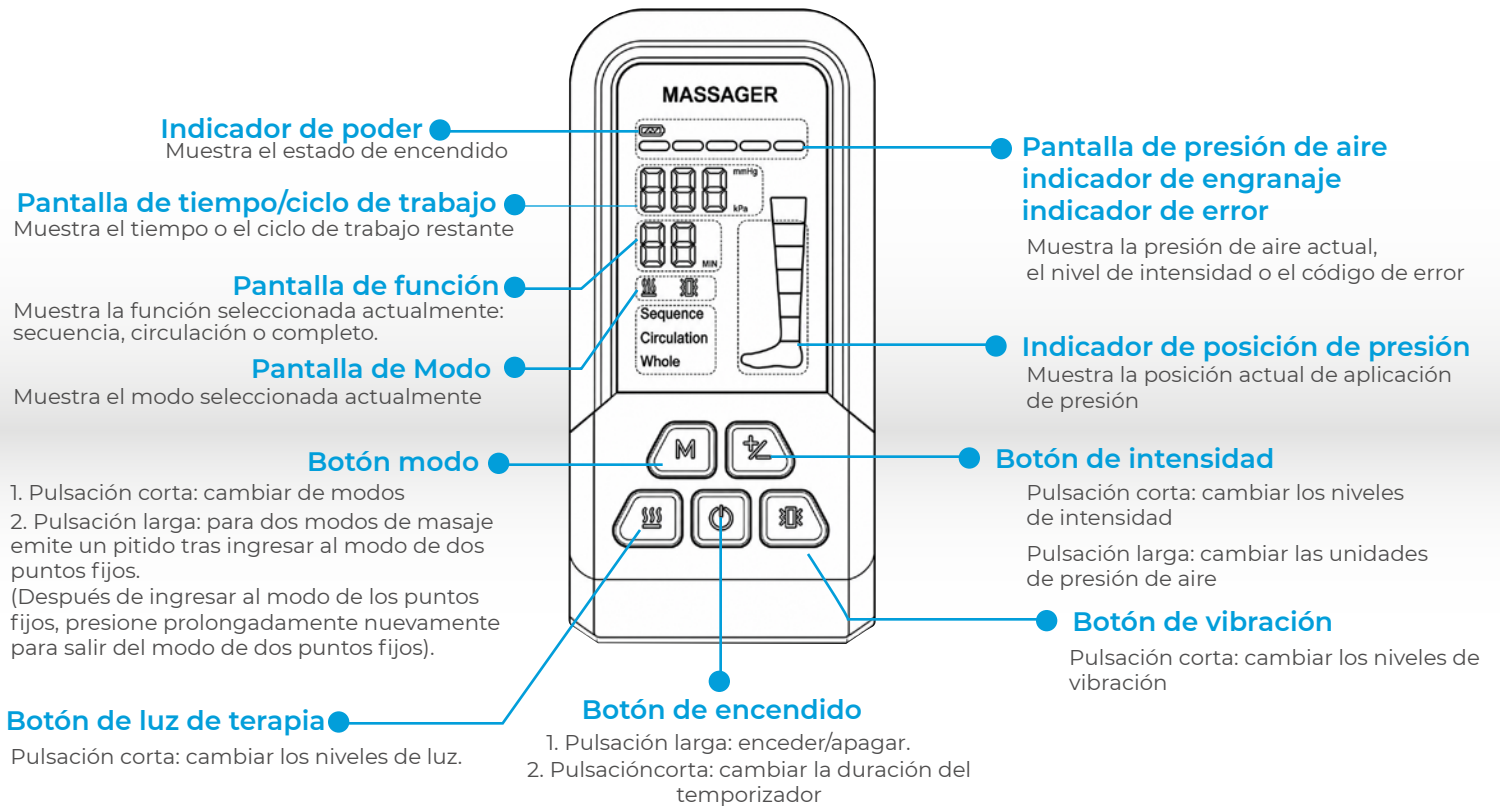

Indicador de poder

Las cinco luces verdes indican el nivel de carga de la batería. Cuando la batería esté baja, el ícono de la batería parpadeará. Durante la carga, las luces del indicador de batería se iluminarán de forma secuencial.

Indicador de presión de aire

Muestra el valor de la presión en tiempo real durante el funcionamiento. Al ajustar la presión, se mostrará el valor configurado y, después de 2 segundos, la pantalla volverá automáticamente a mostrar la presión en tiempo real.

Indicador de tiempo

Durante el funcionamiento, se muestra el temporizador con la cuenta regresiva (tiempo restante). Al configurar el temporizador, se visualizará el tiempo seleccionado (10 minutos, 20 minutos o 30 minutos).

Indicador de funciones

Cuando se activa la función de vibración o de luz, se iluminará el ícono correspondiente en la pantalla.

Indicador de modo


Cuando un modo está en uso, se iluminará el indicador del modo correspondiente.

Los modos disponibles son:

Secuencia
Circulación
Completo

Cuando ninguno de estos tres modos aparece en la pantalla, el dispositivo está funcionando en modo de punto fijo.

El indicador de la pierna ubicado a la derecha muestra la zona que está recibiendo el masaje de punto fijo en ese momento.

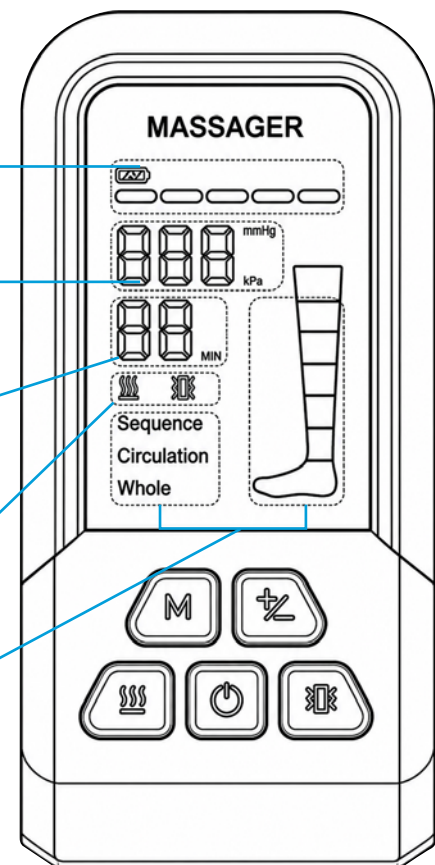

FUNCIONES BOTONES

1. Botón de encendido

Pulsación larga: Enciende o apaga el dispositivo.
Pulsación corta: Cambia el tiempo del temporizador entre 10, 20 y 30 minutos.
Al encender el equipo, el tiempo predeterminado es de 20 minutos.

2. Botón de intensidad (+/-)

Pulsación corta: Ajusta la intensidad de la presión de aire con 5 niveles:

L-1, L-2, L-3, L-4 y L-5

El nivel predeterminado al encender el equipo es L-3.
Pulsación larga: Cambia la unidad de presión entre mmHg y kPa.
La unidad predeterminada es kPa.

3. Botón de modo (M)

Pulsación corta: Cambia entre los modos de masaje:
Secuencia
Circulación
Completo
El modo predeterminado al encender el equipo es Secuencia.
Pulsación larga: Entra o sale del modo de punto fijo.
En el modo de punto fijo, una pulsación corta permite seleccionar el área de masaje.

4. Botón de luz de terapia infrarroja

Pulsación corta: Activa la función de luz de terapia o cambia entre los 3 niveles de luz:
H-1, H-2 y H-3

5. Botón de vibración

Pulsación corta: Activa la función de vibración o cambia entre los 3 niveles de vibración:P-1, P-2 y P-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje de carga	5V CC
Potencia de carga	10 W
Batería	4000 mAh
Tamaño talla M	88 cm alto
Tamaño talla L	79 cm alto
Peso	3840gr con caja
Color	Negro

