

SUPER MINI MASAJEADOR PERCUTOR - PAJARO

El Super Mini masajeador gatico es un dispositivo diseñado para proporcionar un masaje profundo en los músculos y la fascia, ideal para la relajación muscular después de realizar deporte o actividad física. Ayuda a reducir la rigidez y el dolor muscular, aliviar la fatiga, acelerar la circulación sanguínea y contribuir a mejorar la salud de los tejidos blandos del cuerpo.



CARACTERÍSTICAS

Su tamaño ligero facilita llevarlo en el bolso, la mochila o la maleta, convirtiéndolo en el compañero perfecto para el hogar, la oficina o los viajes.

BENEFICIOS

- Ayuda a aliviar la tensión y el cansancio muscular.
- Favorece la relajación y el bienestar.
- Estimula la circulación en la zona de aplicación.
- Diseño portátil, ligero y fácil de usar.
- Ideal para cuello, hombros, espalda, brazos y piernas.

Aplicar el masajeador sobre la zona deseada con movimientos suaves durante unos minutos para obtener una sensación de alivio y relajación.

INCLUYE



1. Mini masajeador gatico
2. Cabezal forma rock
3. Cabezal de empuje
4. Cabezal de golpe
5. cabezal forma pata
6. Cabezal forma garra
7. Manual de uso
8. Cable cargador
9. Bolsa de transporte o regalo

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Mini pistola de masaje gatito
Estructura	Compuesto principalmente por la unidad de control y el cabezal de masaje.
Frecuencia de vibración vertical:	≤60 Hz
Amplitud	7 mm
Potencia nominal	25 W
Voltaje nominal	11.1 V
Capacidad de la batería	800 mAh
Temporizador	Apagado automático inteligente después de 10 minutos.
Modo de funcionamiento	Trabajo intermitente.
Peso	1188 GR
Tamaño	Ancho: 74 mm, Grosor: 57 mm Alto: 139 mm

Instalación del cabezal de masaje

La pistola de masaje debe instalarse con el cabezal de masaje antes del primer uso.

Para instalar el cabezal, sáquelo del empaque, insértelo en la ranura correspondiente de la pistola de masaje y asegúrese de que quede firmemente sujeto.

Nota: No instale ni retire el cabezal de masaje mientras el dispositivo esté en funcionamiento, ya que podría causar lesiones mecánicas.

2. Encendido y funcionamiento

- Mantenga presionado el botón de encendido para iniciar el dispositivo. Al encenderse, comenzará en el nivel 1.
- Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre los niveles 0, 1, 2 y 3.
- Cuando el dispositivo esté funcionando en los niveles 1, 2 o 3, mantenga presionado el botón de encendido para volver al nivel 0, deteniendo la vibración.
- Cuando el dispositivo esté en el nivel 0, mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo.

Funciones automáticas e indicadores

- Después de 10 minutos de funcionamiento, el dispositivo cambia automáticamente al nivel 0 y deja de funcionar.
- El indicador LED muestra el nivel de velocidad correspondiente:
1 luz encendida: Nivel 1.
2 luces encendidas: Nivel 2.
3 luces encendidas: Nivel 3.
- Si ocurre un sobrecalentamiento, la luz roja parpadeará rápidamente.
- Cuando el dispositivo permanece en modo de espera (nivel 0), se apagará automáticamente después de 20 segundos sin realizar ninguna operación.
- Al encender o apagar el dispositivo:
Si la batería tiene menos del 20 %, la luz roja permanecerá encendida.
Si la batería tiene menos del 10 %, la luz roja parpadeará lentamente.