

SUPER MINI MASAJEADOR PERCUTOR - CONEJO

Disfruta de un masaje relajante en cualquier momento y lugar con este masajeador eléctrico portátil. Su diseño compacto y ergonómico permite aliviar la tensión muscular, reducir la sensación de fatiga y brindar una agradable sensación de bienestar mediante vibraciones de alta frecuencia.



CARACTERÍSTICAS

Su tamaño ligero facilita llevarlo en el bolso, la mochila o la maleta, convirtiéndolo en el compañero perfecto para el hogar, la oficina o los viajes.

BENEFICIOS

- Ayuda a aliviar la tensión y el cansancio muscular.
- Favorece la relajación y el bienestar.
- Estimula la circulación en la zona de aplicación.
- Diseño portátil, ligero y fácil de usar.
- Ideal para cuello, hombros, espalda, brazos y piernas.

Aplicar el masajeador sobre la zona deseada con movimientos suaves durante unos minutos para obtener una sensación de alivio y relajación.

INCLUYE



1. Mini masajeador conejo
2. Gafas
3. Cabezal zanahoria
4. Cabezal de dedo de la suerte
5. cabezal bolsa de la suerte
6. Cabezal puño de conejo
7. Manual de uso
8. Cable cargador

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre	Mini pistola de masaje
Frecuencia de vibración	60 Hz
Amplitud	7mm
Potencia nominal	25W
Voltaje nominal	11.1 V
Capacidad batería	800 mAh
Temporizador	apagado automatico 10 min
Control de funcionamiento	interruptor para controlar el funcionamiento
Cabezales intercambiables	El cabezal de masaje puede reemplazarse según sea necesario.
Peso	741 gr con caja
Tamaño	alto: 16cm - ancho: 8.5cm circunferencia 12cm

Instalación del cabezal de masaje

La pistola de masaje debe instalarse con el cabezal de masaje antes del primer uso.

Para instalar el cabezal, sáquelo del empaque, insértelo en la ranura correspondiente de la pistola de masaje y asegúrese de que quede firmemente sujeto.

2. Encendido y funcionamiento

- Con el dispositivo apagado, mantenga presionado el botón Encendido/Apagado (On/Off) del panel para encender la pistola de masaje. El equipo iniciará en el Nivel 1.
- Presione brevemente el botón para cambiar entre los niveles 0, 1, 2 y 3.
- Cuando el dispositivo esté en los niveles 1 a 3, mantenga presionado el botón para regresar al Nivel 0, momento en el que el equipo dejará de funcionar.
- En el Nivel 0, mantenga presionado el botón para apagar el dispositivo.
- El equipo cambiará automáticamente al Nivel 0 y dejará de funcionar después de 10 minutos de uso continuo.
- La luz LED indica el nivel de frecuencia de percusión: Nivel 1 corresponde a la frecuencia más baja y Nivel 3 a la más alta.