

MINI MASAJEADOR PISTOLA - ROSA

La Mini Pistola de Masaje es un dispositivo para la relajación profunda de la miofascia, adecuado para el masaje físico después del ejercicio y el fitness. Puede reducir la rigidez y el dolor muscular, aliviar la fatiga muscular, promover la sangre



CARACTERÍSTICAS

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender/apagado el dispositivo.
- Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre los niveles 1 y 5. La velocidad de percusión aumenta de baja a alta.
- El nivel 5 es un modo combinado: los ciclos de velocidad de masaje aumentan de lento a rápido, y luego disminuyen de nuevo a lento.
- El dispositivo funciona durante 5 minutos a la vez.
- Elija la frecuencia de vibración apropiada y aplique la presión necesaria de acuerdo con la parte del cuerpo que esté

CUANDO ESTA ENCENDIDO

- Nivel 1: Se enciende una luz blanca.
- Nivel 2: Dos luces blancas están encendidas.
- Nivel 3: Tres luces blancas están encendidas.
- Nivel 4: Cuatro luces blancas están encendidas.
- Nivel 5: Cinco luces blancas.

INCLUYE




1. Mini masajeador de pistola (1 pieza)
2. Cabezal cono (1 pieza)
3. Cabezal redondo (1 pieza)
4. Cabezal forma garra (1 pieza)
5. Cable de carga (1 pieza)
6. caja (1 pieza)

Tamaño: Altura: 9cm Ancho: 8cm

Peso: 176g

PRESENTACIÓN

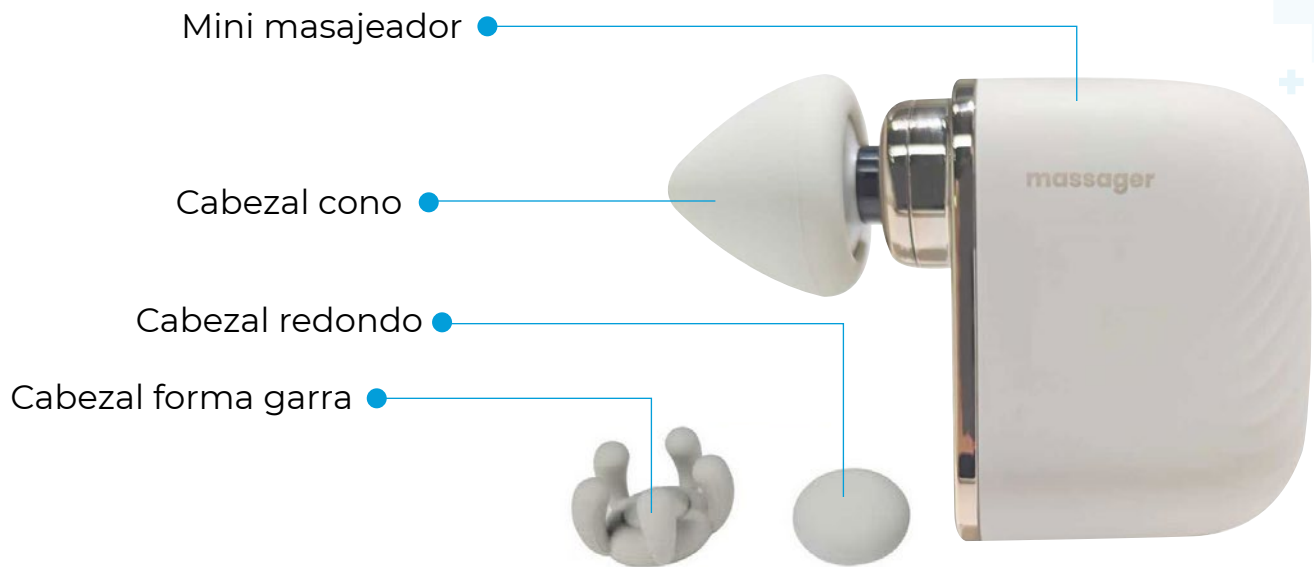

Instrucciones del indicador de encendido

Apagado: La unidad está en modo de espera; todas las luces indicadoras están apagadas.

Advertencia de batería baja: La luz blanca de nivel parpadea lentamente (no afecta al indicador de nivel actual).

Apago de batería baja: la luz blanca de nivel parpadea rápidamente 10 veces, luego el dispositivo se apaga automáticamente.

Carga: Las luces I se iluminan secuencialmente en blanco según el nivel actual de la batería.

Completamente cargado: Las cinco luces indicadoras blancas permanecen encendidas constantemente.

Cargando

1. Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo.
2. No se recomienda descargar completamente la batería hasta que la luz roja parpadee.
3. Cuando la luz roja del indicador de encendido esté encendida, recarguela de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia de entrada	10 W
Voltaje de carga	5V= 2A
Capacidad de la batería	650mAh
Profundidad del trazo	5MM