


ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS X4 UNIDADES - 5X5 CM BLANCO

Los electrodos adhesivos cuadrados están diseñados para transmitir a nuestro cuerpo los impulsos eléctricos que genera el electroestimulador.

Estos electrodos vienen con un adhesivo acrílico, material resistente, son duraderos y seguros para cualquier usuario.

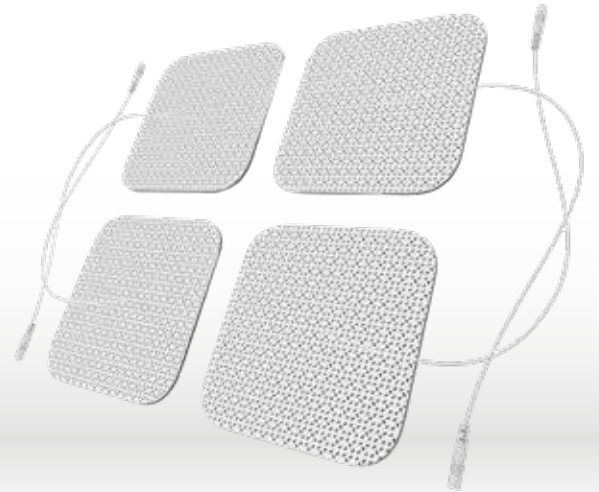


CARACTERÍSTICAS

Están diseñados para su uso con estimulación eléctrica.

- Antes de la aplicación del electrodo limpie con agua y jabón, y posteriormente seque el área.
 - Fije los conductores de los cables a los electrodos.
 - Retire con cuidado los electrodos de la lámina de almacenamiento, y conserve la bolsa para guardarlos.
- Nota:** no pegar los electrodos juntos, sino sobre una superficie plástica.
- 1 Coloque los electrodos en la piel, aplicando la parte del centro y deslizando hacia afuera.
 - 2 Conecte los electrodos a los cables, verificando que el dispositivo se encuentre apagado.
 - 3 Encienda el dispositivo y ajuste gradualmente la intensidad de la corriente.
 - 4 Cuando complete el tratamiento, apague el equipo y retire con cuidado sin halar el cable de los electrodos.

PRESENTACIÓN

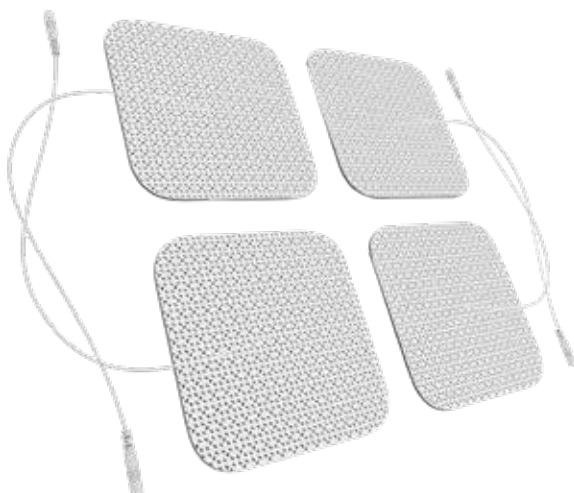

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Electrodos Cuadrados
Autoadhesivos - Reutilizables
Tela blanca 2" x 2" (5x5cm)
Conector de 2mm, cable de cobertura, durabilidad y dispersión total de la corriente
4 unidades por paquete sellado