

COMPRESAS FRIAS DE VINILO AZUL - DORSAL 28 x 53 CM

La compresa fría de vinilo azul reutilizable Relief Pak ofrece un método eficaz para aplicar terapia de frío en un área localizada. Coloque el paquete en una unidad de enfriamiento o congelador. Los paquetes permanecen flexibles y blandos incluso bajo congelación. La compresa mantiene su nivel de temperatura terapéutica hasta por treinta minutos. Los paquetes de grado institucional están hechos de vinilo duradero y resistente exterior e interior de arcilla de bentonita. El paquete refrigerado debe envolverse en una toalla antes de aplicar al área de tratamiento.



CARACTERÍSTICAS

- Un método eficaz para aplicar terapia de frío en un área localizada.
- El relleno de arcilla de bentonita mantiene su temperatura terapéutica hasta por treinta minutos y permanece flexible en todo momento.
- Exterior de vinilo resistente.
- Envuelva en una toalla de tela antes de aplicar al área de tratamiento.

INCLUYE



1. Compresa fría dorsal (1 pieza)
2. Caja (1 pieza)
3. Manual de instrucciones (1 pieza)

PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque una cubierta de Relief Pak® o una toalla de mano entre la piel y la compresa fría; aplique en el área que se está tratando.
- Tratar hasta por 30 minutos
- Limpie toda la humedad de la compresa fría antes de devolverla al congelador.
- Lo mejor es almacenar el paquete frío en el congelador plano, no doblado.
- Las compresas frías son más útiles cuando se mantienen a 12 °F (-11 °C).
- Guarde el paquete frío en el refrigerador cuando no esté en uso.

La terapia de frío puede aliviar las molestias por lesiones, esguinces y distensiones, dolor muscular, equimosis (moretones), inflamación y dolores de cabeza por tensión.

PRECAUCIONES

- NO se siente sobre ella ni aplique una presión excesiva sobre la compresa fría.
- Supervise la aplicación de la compresa fría para asegurarse de que la piel no está irritada por el frío
- NO enfriar por debajo de 0°F (-17°C)
- **NO poner en el congelador, porque se puede dañar.**

ADVERTENCIAS

- NO intente usar la compresa fría como una compresa caliente.
- NO ponga la compresa fría en el microondas; la compresa fría es solo para terapia de frío.
- NO caliente en agua caliente.
- Limite el tiempo de tratamiento a 30 minutos por aplicación.