

# COMPRESAS CALIENTES

## DE LONA - DORSAL 38X61 CM

Las compresas brindan hasta 30 minutos de alivio terapéutico caliente y húmedo. Una vez caliente y listo para usar, manipule el paquete por la pestaña de la esquina. Asegúrese de envolver la compresa en una toalla antes de usarla. Son ideales para ayudar a tratar el dolor agudo y crónico, aliviar los dolores y la rigidez. Los paquetes de calor húmedo ReliefPak están diseñados para su uso en el hogar o en entornos de múltiples usuarios como clínicas.



### CARACTERÍSTICAS

- Sostenga el paquete por las agarraderas (**rojo y negro**) de cada esquina y agite suavemente. Esto distribuye el relleno y permite que se absorba agua de manera uniforme.
- Coloque el paquete en la unidad de calefacción (en casa, use una olla o sartén grande).
- Llene la unidad de calefacción con suficiente agua para mantener el paquete completamente sumergido.
- Deje el paquete en remojo durante al menos 2 horas. El absorberá completamente el agua. Este largo procedimiento de remojo solo es necesario con un nuevo paquete.

### INCLUYE

1. Compresa de lona caliente dorsal (1 pieza)
2. Caja (1 pieza)
3. Manual de instrucciones (1 pieza)



## PRESENTACIÓN

---

### INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la compresa caliente en una superficie plana con el bolsillo hacia arriba y la solapa abierta.
- Retire el paquete de la unidad de calefacción con pinzas levantando suavemente de las agarraderas.

El paquete de calor húmedo Relief Pak es la solución ideal para aliviar los dolores y molestias de la artritis, el dolor de espalda, las distensiones musculares, la rigidez en el cuello, los esguinces, las articulaciones rígidas, los equimosis (moretones), el dolor general y los espasmos.

### PRECAUCIONES

- Si la compresa está demasiado caliente, use pinzas y toallas adicionales.