

## MASAJEADOR DE MANOS INTELIGENTE

El masajeador de manos inteligente está diseñado para aliviar la tensión, el cansancio y la rigidez en manos y muñecas de forma rápida y cómoda. Utiliza tecnología de compresión de aire, vibración y calor terapéutico para simular un masaje profesional, ayudando a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y reducir el dolor causado por el uso constante del celular, computador o actividades repetitivas.



### CARACTERÍSTICAS

- Por favor, compruebe si el producto tiene energía. Si la energía es demasiado baja y el producto se apaga automáticamente o no se puede encender, cárgalo antes de usarlo
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y no se mojen. No uses joyas.
- Pon tus dedos en los agujeros correctos en orden.
- Este producto es para uso con una sola mano, por favor no lo use con ambas manos al mismo tiempo.

### INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

- Por favor, elija de acuerdo con la fuerza que pueda soportar y asegúrese de que esté cerca de la piel.
- Se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador estándar proporcionado por la máquina para cargar.
- No limpie la máquina con agua.

### INCLUYE



1. Masajeador de manos inteligente (1 pieza)
2. Cable de carga (1 pieza)
3. Manual de uso (1 pieza)

Tamaño: Altura: 24cm Ancho: 20cm

Peso: 687g

# PRESENTACIÓN



## 1. Botón de encendido

Presione largamente "U" para encender/apagar.

Cuando la batería esté completamente cargada: la luz verde estará encendida; batería baja: la luz roja parpadeará; carga: la luz roja parpadeará lentamente; completamente cargada: la luz verde estará encendida.

## 2. Botón de intensidad de masaje

Presione brevemente "ill" para cambiar entre la marcha de 1-5 de fuerza, la marcha de 1 de fuerza es la predeterminada cuando se enciende. 1a marcha: luz verde encendida; 2a marcha: luz azul encendida;

3a marcha: luz amarilla encendida; 4ta marcha: luz púrpura encendida; 5ta marcha: luz roja encendida.

## 3. Botón de modo

El modo predeterminado es uno cuando está encendido. Presione brevemente "M" para cambiar el modo (modo 1, modo 2, modo 3).

Modo 1: luz verde encendida; Modo 2: luz azul encendida; Modo 3: luz roja encendida.

## 4. Botón de compresión en caliente

Presione brevemente "SS" para cambiar entre compresión baja/media/alta/caliente. La configuración predeterminada es no calentar.

Compresa caliente de baja calidad: luz verde encendida; compresa caliente de grado medio: luz amarilla encendida; compresa caliente de alta calidad: luz roja encendida; compresa caliente apagada: luz

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje de carga	5v
Poder	5W
Capacidad batería	2000mAh

### Nota

1. No lo use para otros fines que no sean el masaje de manos.
2. No usar con otros dispositivos terapéuticos al mismo tiempo.
3. No deje que los niños pequeños lo usen ni jueguen.
4. No lo use cuando duerma.
5. Las personas que no pueden expresar sus deseos o no pueden moverse de forma independiente no deberían usarlo.
6. Este producto es para uso con una sola mano, no lo use con ambas manos al mismo tiempo.
7. Cuando lo use, no use objetos duros como joyas o decoraciones de uñas alrededor del área de masaje.
8. No lo use en lugares con mucha humedad, como baños, y no deje que líquidos como el agua entren en contacto con el producto.
9. El dispositivo tiene una superficie de calentamiento, y las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención al usarlo.
10. El tiempo de trabajo predeterminado de este producto es de 15 minutos por vez. Si necesitas usarlo de nuevo, tienes que encenderlo de nuevo. Se recomienda que el tiempo de masaje único no supere los 30 minutos para evitar masajes excesivos.